

Mode d'emploi

Informations pour l'utilisateur

AMGEVITA® 40 mg
solution injectable en stylo prérempli



AMGEN

E.R. s.a. Amgen Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem
BL-AMB-0720-00001 – v(1.0) – Date de creation 23 juillet 2020


Mode d'emploi

Stylo prérempli d'AMGEVITA® SureClick®


Voie sous-cutanée

Schéma des différentes parties

Avant utilisation

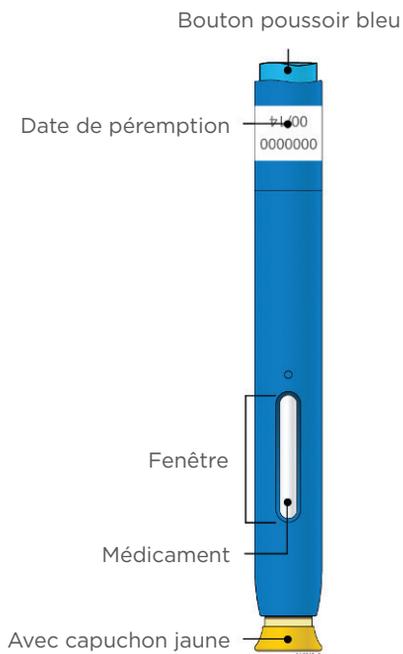

Après utilisation

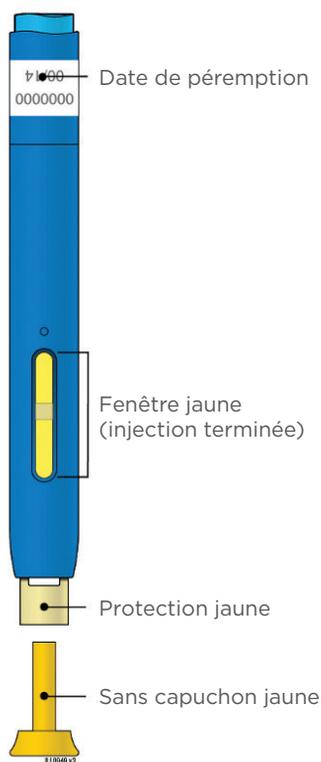

Important : L'aiguille se trouve à l'intérieur

Important

Avant d'utiliser un stylo prérempli d'AMGEVITA, veuillez lire ces informations importantes :

Utilisation de votre stylo prérempli d'AMGEVITA

- Il est important que vous n'essayiez pas de vous injecter le médicament à moins que vous ou votre soignant n'ayez été formés.
- **Ne pas** utiliser le stylo prérempli d'AMGEVITA s'il est tombé sur une surface dure. Une partie du stylo prérempli pourrait être cassé même si cela n'est pas apparent. Utiliser un stylo prérempli d'AMGEVITA neuf.
- Le capuchon de l'aiguille du stylo prérempli d'AMGEVITA est fait en caoutchouc naturel, qui contient du latex. Prévenez votre médecin si vous êtes allergiques au latex.

Etape 1 : Préparation

A. Retirez de l'emballage le nombre de stylos préremplis d'AMGEVITA dont vous avez besoin.


Saisir précautionneusement le stylo prérempli hors de la boîte.

Placer l'emballage d'origine contenant les stylos préremplis inutilisés dans le réfrigérateur.

Pour une injection plus confortable, laisser le stylo prérempli à température ambiante pendant **15 à 30** minutes avant injection.

- **Ne pas** remettre le stylo prérempli au réfrigérateur lorsqu'elle a atteint la température ambiante.
- **Ne pas** essayer de réchauffer le stylo prérempli en utilisant une source de chaleur telle que l'eau chaude ou le four à micro-ondes.
- **Ne pas** secouer le stylo prérempli.
- **Ne pas** encore retirer le capuchon jaune du stylo prérempli.

B. Examiner le stylo prérempli d'AMGEVITA.

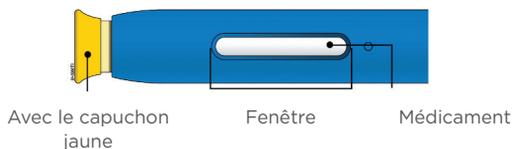

Assurez-vous que le médicament dans la fenêtre soit clair et incolore à légèrement jaune.

- **Ne pas** utiliser stylo prérempli si :
 - Le médicament est trouble ou présente une coloration anormale ou s'il contient des paillettes ou des particules.
 - Une partie semble fissurée ou endommagée.
 - Le stylo est tombé sur une surface dure.
 - Le capuchon jaune est manquant ou mal fixé.
 - La date de péremption imprimée sur l'étiquette est dépassée.

Dans tous les cas, utiliser un stylo neuf.

C. Rassembler tout le matériel nécessaire pour pratiquer l'injection.

Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau. Sur une surface propre et bien éclairée, placez un stylo prérempli neuf.


Vous aurez également besoin de matériel supplémentaire qui n'est pas inclus dans le carton :

- Lingettes alcoolisées
- Coton ou gaze
- Pansement
- Conteneur à déchets tranchants

Dans tous les cas, utiliser un stylo neuf.



D. Préparer et nettoyer votre site d'injection.

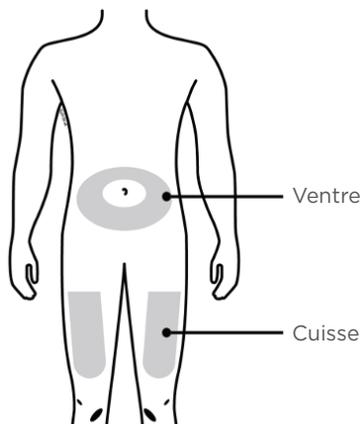

Vous pouvez utiliser:


- Votre cuisse
- Ventre, au-delà de 5 centimètres autour du nombril.

Nettoyez le site d'injection avec une lingette alcoolisée. Laissez sécher votre peau.

- **Ne pas** toucher cette zone avant d'effectuer l'injection
- Si vous voulez utiliser le même site d'injection, assurez-vous qu'il ne s'agit pas exactement du même endroit que celui utilisé pour l'injection précédente.
 - **Ne pas** injecter le médicament dans des régions où la peau est sensible ou présente une ecchymose, une rougeur ou une induration. Evitez d'injecter dans des zones comportant des cicatrices ou des vergetures.
- Si vous êtes atteint de psoriasis, vous devez éviter d'injecter directement dans les zones de peau ou les lésions rouge, épaissie ou squameuse.

Etape 2 : Préparation

E. Retirez le capuchon jaune de façon bien droite lorsque vous êtes prêt à injecter.

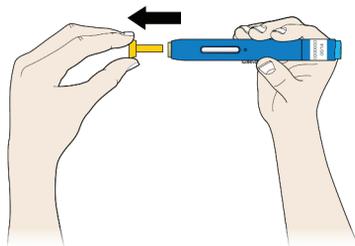


Il est normal d'apercevoir quelques gouttes de liquide à l'extrémité de l'aiguille ou de la protection jaune.

- **Ne pas** tordre ou plier le capuchon jaune.
- **Ne pas** remettre le capuchon jaune sur le stylo prérempli
- **Ne pas** retirer le capuchon de l'aiguille du stylo avant d'être prêt à injecter.


F. Etirez ou pincez votre site d'injection pour créer une surface ferme.

Méthode d'étirement

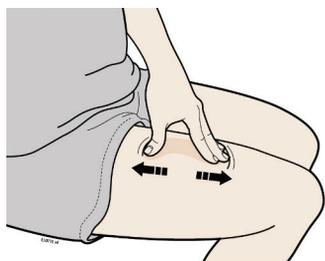

Etirer la peau fermement entre le pouce et les autres doigts pour créer une zone d'environ **5** centimètres de largeur.

Méthode de pincement

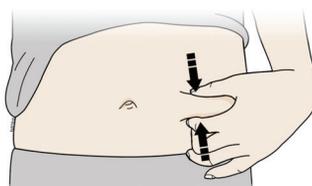


Pincer la peau fermement entre le pouce et les autres doigts pour créer une zone d'environ **5** centimètres de largeur.

Important : Conserver la peau pincée pendant l'injection.


Etape 3 : Injection

G. Maintenez la peau étirée ou pincée. Sans le capuchon jaune, placer le stylo prérempli sur la peau avec un angle de 90 degrés.

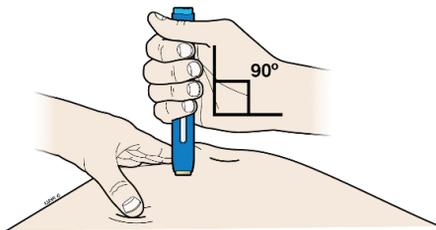

Important : Ne pas presser le bouton bleu.


H. Presser fermement le stylo prérempli vers le bas contre la peau jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.

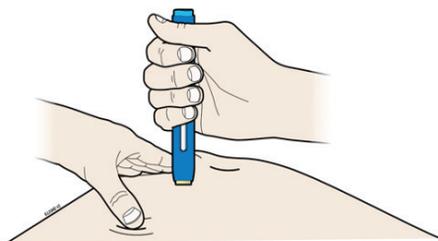




Appuyer

Important : Vous devez pousser vers le bas mais ne pas toucher le bouton bleu jusqu'à ce que vous soyez prêt à injecter.


I. Lorsque vous êtes prêt à injecter, appuyer sur le bouton bleu de démarrage. Vous entendrez un clic.

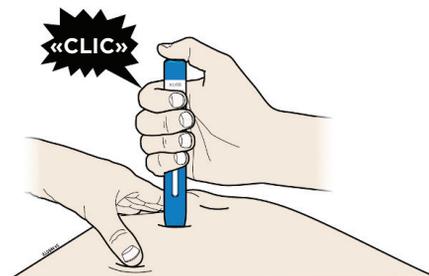

J. Continuer à presser vers le bas contre votre peau. Votre injection peut durer environ 10 secondes.

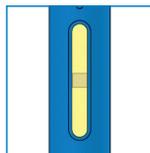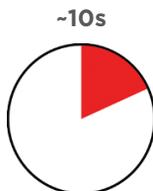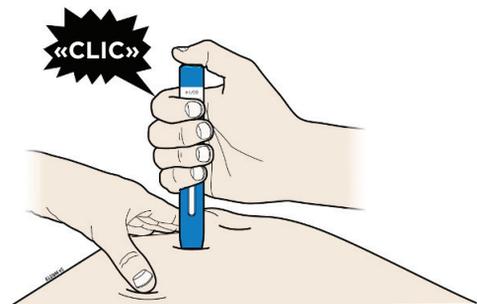

La fenêtre devient jaune lorsque l'injection est finie. Vous pouvez entendre un second clic.

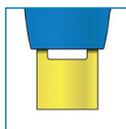


Note : Après avoir retiré le stylo prérempli, l'aiguille sera automatiquement recouverte.

Important : Lorsque vous retirez le stylo prérempli, si la fenêtre n'est pas devenue jaune, ou si vous avez l'impression que le médicament est toujours en cours d'injection, ceci signifie que vous n'avez pas reçu la dose complète. Contactez votre médecin immédiatement.

Etape 4 : Fin

K. Eliminer le stylo utilisé et le capuchon jaune de l'aiguille.

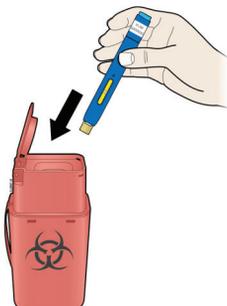

- Placer le stylo prérempli utilisé dans le conteneur à déchets tranchants immédiatement après utilisation. **Ne pas** jeter le stylo prérempli avec les ordures ménagères.
- Discutez avec votre médecin ou pharmacien de l'élimination adéquate. Il peut exister des recommandations locales d'élimination.
- **Ne pas** réutiliser le stylo prérempli.
- **Ne pas** recycler le stylo prérempli ou le conteneur à déchets tranchants et ne pas les jeter avec les ordures ménagères.

Important : Toujours garder le conteneur à déchets tranchants hors de la vue et de la portée des enfants.

K. Examiner le site d'injection.

En cas de saignement, appuyez un morceau de coton ou de gaze sur le site d'injection. **Ne pas** frotter le site d'injection. Appliquez un pansement si nécessaire.

